

GEBRAUCHSANWEISUNG

HISTAMIN TEST



BITTE BEACHTEN SIE GENAU DIE GEBRAUCHS- ANWEISUNG

Ergebnisse können sonst verfälscht dargestellt werden und bieten somit keine Garantie für eine genaue Analytik.

HINWEISE ZUM PROBENVERSAND

Deutschland: Montag bis Donnerstag

Ausland: Montag bis Mittwoch

Der Versand sollte nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Schritt 1:

WICHTIGE HINWEISE

Bitte entnehmen Sie die Probenröhrchen der Verpackung und legen Sie diese für die Probennahme bereit.

Flachspül-Toilette & Tiefspül-Toilette:

Bitte beiliegende „Stuhlauffanghilfe“ (Patientenhilfe für die Entnahme der Stuhlprobe) benutzen. Probe bis zum Versand im Kühlschrank bei 2-8 C° aufbewahren, jedoch nicht einfrieren!

Die Untersuchung von Histamin im Stuhl dient der Abklärung einer Unverträglichkeit, die möglicherweise durch Histamin ausgelöst worden ist. Diese kann entstehen, wenn nach dem Genuss von histaminreichen Nahrungsmitteln, durch Fäulnisprozesse im Darm oder durch übermäßige Ausschüttung aus den Darmmastozyten hohe Mengen an Histamin angeschwemmt werden.

Die Probennahme sollte daher nicht im Rahmen einer histaminfreien bzw. histaminarmen Ernährung durchgeführt werden, da ansonsten falsch-normale Laborergebnisse zu erwarten sind. Unter der Voraussetzung, dass bei Ihnen bisher noch keine akuten Histaminreaktionen wie z. B. Herzrasen, Kreislaufstörungen, Schwindel, Übelkeit/Erbrechen oder Atemnot aufgetreten sind, können am Vorabend Nahrungsmittel bzw. Getränke bevorzugt werden, die in Verdacht stehen, bei Ihnen eine Histaminreaktion auszulösen.

Wichtiger Hinweis für Frauen:

Bitte nehmen Sie keine Probe während Ihrer Periode.

Schritt 2: **VORBEREITUNG**

Prüfen Sie das Testset auf Vollständigkeit.

Sollten Komponenten aus dem Testset fehlen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir werden Ihnen umgehend Ersatzmaterial zukommen lassen. Dies gilt natürlich auch für beschädigte Ware.

Schritt 3: **DURCHFÜHRUNG**

Die Anleitung zur Durchführung dieses Tests finden Sie im Innenteil dieses Dokuments.

Schritt 4: **TESTREGISTRIERUNG**

Die Anleitung zur Testregistrierung dieses finden Sie ebenfalls im Innenteil dieses Dokuments.

Schritt 5: **VERSAND**

Bitte werfen Sie die Probe bei mehr als 25°C und kälter als 4°C nicht in den Briefkasten, sondern geben Sie die Probe in der Postfiliale ab.


Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen. Aus Österreich sollte der Versand Montag bis Mittwoch, nicht vor Feiertagen erfolgen. Bringen Sie die Proben noch am Tag der Probenahme zur Post.

Inhalt

1 Probenbegleitschein



1 Histamin-Probenröhrchen
mit Etikett in Versandgefäß

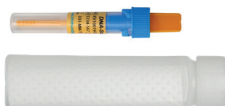

1 Stuhlfänger



1 Versandtasche



ACHTUNG!

*Die Stabilisatorflüssigkeit im
blau-orangen Histaminprobenröhrchen
NICHT ausschütten!*



Mit dem Scannen dieses QR-Codes erhalten Sie Zugang zu den Gebrauchsanweisungen der Komponenten der einzelnen Hersteller.

www.medivere.de/gebrauchsanweisungen


Schritt 3:

DURCHFÜHRUNG

Nachdem Sie den Abschnitt „Wichtige Hinweise“ aus Schritt 1 sorgfältig gelesen haben, können Sie mit der Probennahme beginnen. **Befolgen Sie die folgenden Schritte bitte streng nach Anleitung.** Nur so kann ein korrektes Messergebnis der Probe gewährleistet werden.



01

Reinigen und trocknen Sie zunächst die Toilettenbrille. Platzieren Sie anschließend die Stuhlauffanghilfe gemäß der Testanleitung in der Toilette und achten Sie auf eine sichere, korrekte Befestigung.

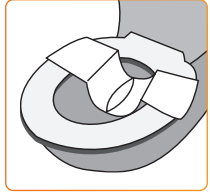


02

Nehmen Sie das Histamin-Probenröhrchen und das Etikett aus der Umverpackung. Beschriften Sie zunächst das Etikett mit Namen und Probendatum. Kleben Sie dieses anschließend auf das Probenröhrchen. Kleben Sie ebenfalls eines der Barcode-Etiketten des Probenbegleitscheins auf die Probe.

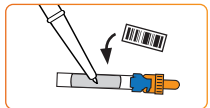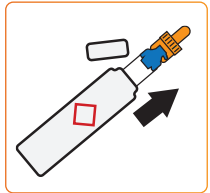


03

Öffnen Sie nun das Probenröhrchen: Halten Sie hierzu das transparente Röhrchen mit der einen Hand sowie den darüber liegenden blauen Adapter mit Daumen und Zeigefinger derselben Hand fest. Drehen Sie mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand den orangefarbenen Stick gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den orangefarbenen Entnahmestab heraus. **Der blaue Adapter darf nicht abgeschraubt werden! Die Flüssigkeit nicht aus dem Probenröhrchen schütten!**

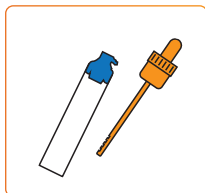

04


Stechen Sie mit der Spitze des orangefarbenen Sticks **an drei verschiedenen Stellen in die Stuhlprobe**. Achten Sie darauf, dass nur die Rillen der Spitze vollständig mit Stuhl befüllt sind.

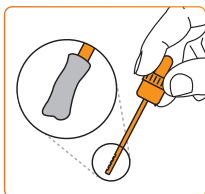

Achtung: Es darf nur diese kleine, definierte Menge an Stuhl in das Stuhlprobenröhrchen gelangen. Eine zu große Menge an Stuhl kann dazu führen, dass Ihre Probe nicht mehr gemessen werden kann.

05

Stecken Sie den mit der Stuhlprobe benetzten Entnahmestab durch den blauen Adapter in das transparente Röhrchen, um überflüssiges Material abzustreichen.

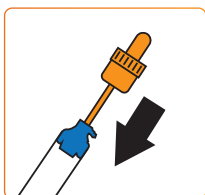

06


Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis dieser im blauen Adapter einrastet. Durch das Einrasten wird das Auslaufen der Pufferlösung verhindert.



07

Stecken Sie das Probenröhrchen in das Versandgefäß und verschließen Sie dieses sorgfältig.

Bekleben Sie das Versandgefäß ebenfalls mit einem **Barcode-Etikett**. Diese befinden sich auf dem Probenbegleitschein.

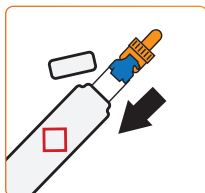

Schritt 4: TESTREGISTRIERUNG

Damit wir Ihre Analyse durchführen können, müssen Sie Ihren Test zunächst registrieren. Im unteren Bereich des Probenbegleitscheins befindet sich der Kundenabschnitt mit QR-Code.

- QR-Code scannen, um zum Kundenportal zu gelangen
- Persönliche Daten eingeben und Test registrieren
- Registrierung mit „Daten senden“ bestätigen
Wichtig: Test erst registrieren, wenn die Probe an das Labor gesendet wird
- Kundenabschnitt abtrennen und aufbewahren

Wir können Ihre eingegebenen Daten nur abrufen, wenn Sie Ihre Probe mit einem Barcode-Etikett bekleben.

Wenn Sie Ihren Test online registriert haben, müssen Sie den Probenbegleitschein nicht mitsenden.

Sollten Sie die Probe nicht online registrieren können, folgen Sie bitte der Anleitung auf dem Probenbegleitschein.

Schritt 5: PROBENVERSAND

Versenden Sie die Probe nicht vor dem Wochenende oder vor Feiertagen.

- Versandgefäß inkl. mit Barcode-Etikett beklebtes Probenmaterial in die beiliegende Versandtasche legen
- Probenbegleitschein nur beilegen, wenn der Test nicht online registriert wurde.
- Schutzstreifen abziehen und Versandtasche zukleben.
Achtung: Versandtasche ist danach nicht mehr zu öffnen.
- Versandtasche umgehend an das Labor zurücksenden.
Bis zum Versand sollte die Probe bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

Hinweise zur Befundabfrage

Download Ihres Befunds

Sind bei der Online-Registrierung der Seriennummer oder auf dem Probenbegleitschein alle persönlichen Daten vollständig eingetragen, wird Ihnen der Befund automatisch per Post zugestellt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, den Befund vorab über das Internet abzurufen.

Wenn Sie einen anonymen Befund wünschen, tragen Sie bitte bei der Online-Registrierung der Seriennummer oder im beiliegenden Probenbegleitschein lediglich Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsdatum ein. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall keine Zustellung per Post möglich ist. Zum Download Ihres Befundes gehen Sie bitte auf unsere Webseite www.medivere.de

Unter dem Link www.medivere.de/befundabfrage geben Sie die Serien- und die Codenummer Ihres Testsets ein. Diese finden Sie auf dem abtrennbaren Kundenabschnitt des Probenbegleitscheins. Anschließend wählen Sie Ihr Geburtsdatum aus und klicken auf „Daten absenden“, um Ihren persönlichen Befund zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass Ihr Befund nur 2 Jahre lang abrufbar ist. Falls Sie Ihren Befund zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchten, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.



Serien-Nr.:	Serien-Nr. (8-stellig)
Code:	Code (4-stellig)
Geburtsdatum:	TT.mm.jjjj 
DATEN ABSENDEN	

QR-Code scannen, um direkt zur Befundabfrage geleitet zu werden.

Symbole und Beschreibungen auf der Etikettierung

	Hersteller
	Katalognummer
	Gebrauchsanweisung beachten
	Chargenbezeichnung
	Verwendbar bis (MM.JJJJ)
	Nicht wiederverwenden
	Trocken aufbewahren
	Temperaturgrenzwerte
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonnenlicht schützen
	Achtung
	Mengenangabe der Verpackungseinheit
	Nutzung von Wertstoffen aus Abfällen
	Kann im Hausmüll entsorgt werden
	Unsteril
	Es liegen Referenzwerte für alle Geschlechter und Altersklassen vor.
	Achtung: Gesundheitsgefährdend

Verwendungszweck: Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Probe und anschließender *in-vitro*-diagnostischer Untersuchung in einem Partnerlabor.

Garantie

Ihre Zufriedenheit mit unserem Produkt liegt uns sehr am Herzen. Sollte Ihr Testpaket nicht vollständig oder fehlerhaft gepackt sein oder Ihnen ist bei der Probennahme ein Fehler unterlaufen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

+49 6131 7205-216 oder **reklamation@medivere.de**

Halten Sie bitte Ihren Probenbegleitschein bereit und entsorgen Sie diesen nicht. Die darauf stehende Serien- und Codenummer wird benötigt, um Ihnen neues, kostenfreies Probenmaterial zu senden.



medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 111
55128 Mainz

WAS WIRD GETESTET?

Laboranalyse von Histamin im Stuhl zur Bestimmung der intestinalen Histaminmenge.

PROBENNAHME

 **STUHL**



Indikationen: Kopfschmerzen, Hautausschläge, Magen-Darm-Probleme, Atembeschwerden, Kreislaufbeschwerden

Verwendungszweck: Behandlungseinheit zur Gewinnung einer humanen Probe und anschließender *in-vitro*-diagnostischer Untersuchung in einem Partnerlabor.

Behandlungseinheit nach Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/745

Die medivere GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte entsprechend den Hinweisen der Hersteller geprüft, verpackt, die Benutzerhinweise der Hersteller einbezogen und die Zusammenstellung entsprechend den Vorgaben der internen Überwachung Überprüfung und Validierung vorgenommen wurden.



medivere GmbH
Hans-Böckler-Straße 111, 55128 Mainz
www.medivere.de

REF

210003DE

QTY 1

